

BOB

das universelle
Toilettensitz-System von Rifton



Gebrauchsanleitung



...führend durch Innovationen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Kauf unseres Produktes danken.

Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes, die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise und die Anweisungen aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchswweisung bei dem Produkt verbleibt. Fertigen Sie ggf. sicherheitshalber eine Fotokopie an.

Ihr Schuchmann Team


schuchmann

Inhalt	Seite
1. Warnhinweis	4
2. Zusammenbau und Einstellungen	
2.1 Sitzauflage und Spritzschutz	4
2.2 Armlehnen	4
2.3 Beckengurt	4
2.4 Rücken bzw. Sitztiefe einstellen	5
2.5 Verstellung des Rückenwinkels	5
2.6 Tisch	5
2.7 Anbau Sitz an das Untergestell	6
2.8 Fußbrett	6
2.9 Transportrollen	7
2.10 Abduktionsblock	7
2.11 Toiletteneimer	7
3. Bedienungshinweise	
3.1 Freistehend	8
3.2 Über der Toilette	8
3.3 auf der Toilette montiert	8
3.4 Anbau Anbaubügel	9
3.5 Einsetzen Toilettensitz	9
4. Wartung	9
5. Reinigung	9
6. Konstruktion	10
7. Technische Daten	10
8. Zusätzliche Hinweise	
8.1 Veränderungen durch den Benutzer	11
8.2 Einzelteilbestellung	11
8.3 Garantie	11

1. Warnhinweis

- ☞ Die korrekte Benutzung des Produktes erfordert eine genaue und sorgfältige Einarbeitung des behandelnden Betreuers.
- ☞ Das Produkt darf nicht ohne Aufsicht benutzt werden.
- ☞ Die Haltegurte dienen zur Sicherheit des Benutzers, und die Benutzung ist genau zu beaufsichtigen.
- ☞ Die Haltegurte sind sorgfältig anzubringen und der richtige Sitz ist zu prüfen.
- ☞ Die Gurte können den Betreuer nicht ersetzen.


2. Zusammenbau und Einstellungen

2.1 Sitzauflage und Spritzschutz

Die weiche Sitzauflage (**A**) paßt genau in die Öffnung des Toilettensitzes. Er ist einfach auszubauen und zu reinigen. Die Sitzauflage sollte nicht ohne den Toilettensitz benutzt werden.

Der Spritzschutz (**B**) ist bei der Größe 1 in der Sitzauflage integriert.

Bei der Größe 2 ist der Spritzschutz als Zubehör erhältlich und wird von oben in die Sitzauflage eingesteckt.

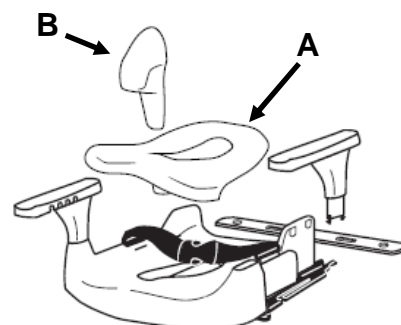

2.2 Armlehnen

Die Armlehnen (**C**) passen in die Aufnahmen an der Seite des Sitzes. Sie müssen vollständig heruntergedrückt werden, um fest einzurasten. Zum Abbau drücken Sie die schwarzen Halteclipsse (**D**) unter dem Sitz zusammen und ziehen die Armlehnen heraus.




2.3 Beckengurt

Der Beckengurt rastet in den schmalen Aufnahmen am hinteren Teil des Sitzes ein.

Zum Abbau drücken Sie die weißen Halteclipsse unter dem Sitz zusammen und ziehen den Beckengurt heraus.


Beim Einbau bitte die nebenstehende Zeichnung beachten.

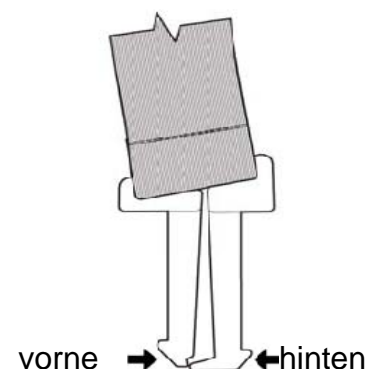

2.4 Ein- und Ausbau des Rückens bzw. Einstellung der Sitztiefe


Den Bezugsstoff nach oben schieben, Den Rahmen leicht nach rechts und links aufbiegen. Der Rücken muß parallel zur Sitzfläche liegen um die Fixierung in einem der beiden Löcher zu positionieren. Jetzt kann der Rücken hochgeklappt werden, hierzu die weißen Auslöser (E) ziehen. Den Bezug zurückschieben. Zum Abbau die Prozedur umkehren.

Der Toilettensitz bietet die Möglichkeit die Sitztiefe zweifach zu verstellen. Um die Verstellung auszuführen, muß der Rücken in das jeweils andere Loch eingebaut werden.

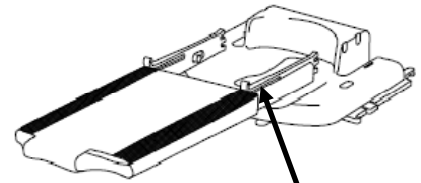

2.5 Verstellung des Rückenwinkels

Die weißen Auslöser (E) hochziehen. Der Rücken kann jetzt 5° nach vorne bzw. 5° oder 15° nach hinten verstellt werden. Die weißen Auslöser (E) müssen hörbar einrasten.

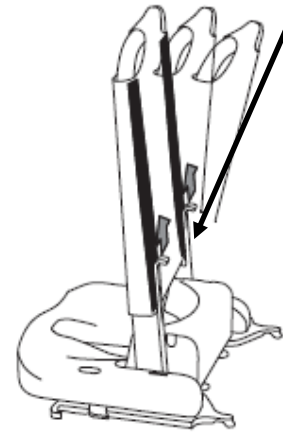

2.6 Tisch

Der Tisch wird an den Armlehnen montiert. Er läßt sich in vier Positionen verriegeln. Der Auslöser befindet sich unter dem Tisch.




2.7 Anbau des Sitzes an das Untergestell

Die Innenseite des Rahmens hat viele Aussparungen. Diese definieren die Höhe des Sitzes und des Fußbrettes.

Der Sitz muss in eine dieser Aussparungen hörbar einrasten.

Um den Sitz abzubauen, die Halteclipse (schwarze Pfeile) eindrücken.

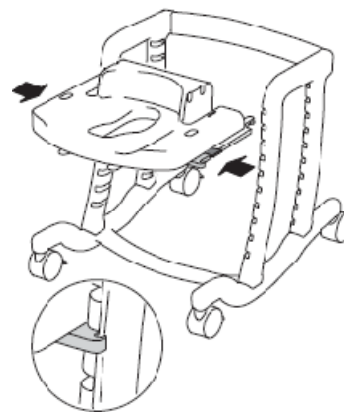

☞ Den Sitz und das Untergestell **niemals benutzen**, ohne daß die Halteclipse eingerastet sind.

2.8 Fußbrett


a.) Anbau an das Untergestell

Das Kunststoff - Fußbrett rastet in den gleichen Aussparungen ein wie schon oben beim Sitz beschrieben, auch die Höhe ist hierdurch definiert.

Die Halteclipse müssen hörbar einrasten.

Um das Fußbrett abzubauen, die Halteclipse (schwarze Pfeile) eindrücken.

Die Fußgurte können durch die vorgesehenen Öffnungen breitenverstellt werden

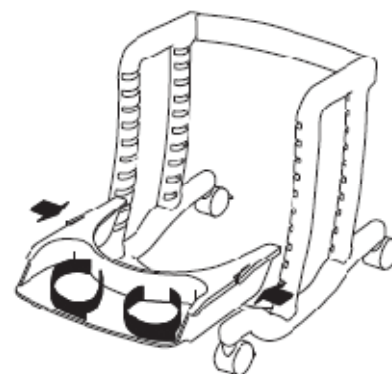

☞ Das Fußbrett **niemals benutzen**, ohne daß die Halteclipse eingerastet sind.


☞ Das Fußbrett ist **kein** Trittbrett

b.) Anbau an den Sitz

Das Aluminium - Fußbrett paßt von der Vorderseite aus unter den Toilettensitz. Der Zugspannstift (F) muß hörbar einrasten. Den Sitz niemals benutzen, ohne daß der Zugspannstift eingerastet ist.

Um das Fußbrett abzubauen, den Kopf des Zugspannstiftes ziehen.

Die Höhe wird durch Lösen der beiden Diskusgriffe (schwarze Pfeile), die sich von der Vorderseite aus hinter dem Fußbrett befinden, eingestellt. Diskusgriffe wieder festziehen.

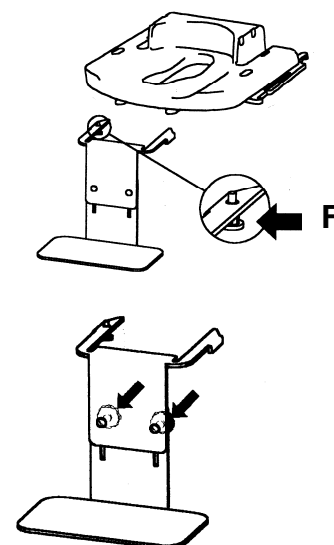


☞ Bei Benutzung des Aluminium-Fußbrettes kann der Abduktionsblock (2.9) **nicht** genutzt werden


2.9 Transportrollen

Das oben genannte Untergestell sollte grundsätzlich durch Abbremsen der 2 hinteren Transportrollen festgestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden.

Bremsen/Feststellen der Lenkrollen (mit Schuhspitze):

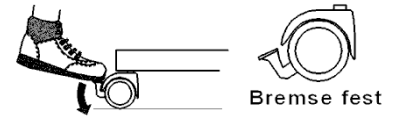


Lösen der Lenkrollen:

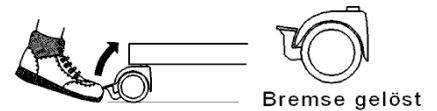

2.10 Abduktionsblock


Der Abduktionskeil paßt von der Vorderseite aus unter den Toilettensitz. Die Halteclipsse (schwarze Pfeile) müssen hörbar einrasten.

Um den Abduktionskeil abzubauen, die Halteclipsse (schwarze Pfeile) eindrücken.

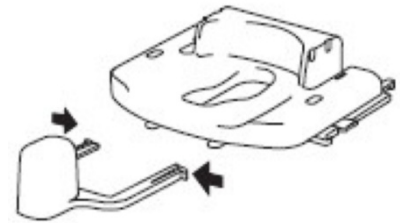

2.11 Toiletteneimer

Der Toiletteneimer paßt von vorn und von hinten unter den Toilettensitz. Bei Benutzung des Abduktionskeils ist der Toiletteneimer nur von hinten unter den Sitz zu schieben.

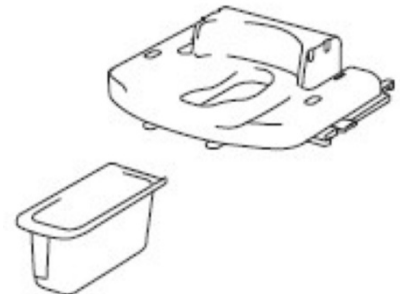

3. Bedienungshinweise

3.1 Freistehend

Der Toiletteneimer (siehe Punkt 2.11) muß angebracht werden. Die tiefste Einstellung des Sitzes ist die dritte Aussparung von unten.

Nutzung als Duschstuhl:

Die Kunststoffmaterialien sind wasserunempfindlich.




3.2 Über der Toilette

Den Toilettendeckel und die Brille öffnen. Die Höhe des Blue Wave Toilettensitzes an die Toilettenhöhe anpassen. Das Fußbrett, wenn nötig, nachstellen. Den Toilettenstuhl rückwärts über die Toilette fahren und die Rollen feststellen.



3.3 Auf der Toilette montiert

Der Anbaubügel (siehe Punkt 3.4) ist dauerhaft an der Toilettenschüssel angebracht, aber behindert nicht die normale Benutzung der Toilette. Er stellt eine sichere und schnelle Montage des Toilettensitzes ohne Werkzeug sicher. Der Toilettensitz kann mit heruntergeklappter Rückenlehne schnell abgebaut und gelagert werden.

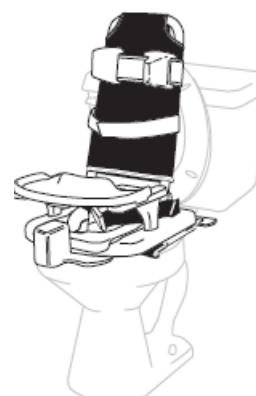

3.4 Anbau des Anbaubügels an die Toilette


Lösen Sie die Halteschrauben, welche den Deckel und die Brille halten. Entfernen Sie den Deckel und die Brille. Die beiden mitgelieferten Gummiringe über die Löcher der Toilettenschüssel legen. Den Anbaubügel mit dem Sicherheitssiegel nach oben über die Löcher legen, anschließend den Deckel und die Brille wieder anbauen.



3.5 Aufsetzen des Toilettensitzes auf die Toilette

Der Rücken sollte vor dem Aufsetzen in der „5° nach vorne“ Position stehen.

Die Kunststoffhaken von vorn in den Anbaubügel haken und den Toilettensitz auf den Toilettenrand legen. Prüfen Sie, ob die Haken sicher eingehakt sind.

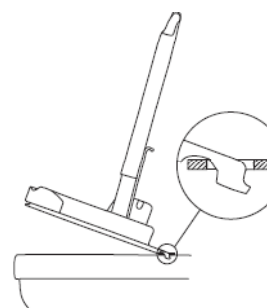

4. Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz auf Risse, Brüche, lockere oder verlorene Teile und / oder Funktionsstörungen. Überprüfen Sie den Bezug auf Risse, Löcher oder abgenutzte Stellen. Entfernen Sie das Produkt aus dem laufenden Betrieb, wenn eine Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann.

5. Reinigung

Waschen Sie den Sitz, das Untergestell und alle anderen Kunststoffteile mit einer milden Seifenlauge ab.

Die Bezüge und Gurte können in der Waschmaschine bei max. 40°C gewaschen werden und anschließend naß aufhängen.

Die Bezüge und Gurte sind **nicht Trockner** geeignet, bitte auch **nicht bügeln**.

6. Konstruktion


Der Blue Wave Toilettensitz ist aus UV beständigem PVC und Vinylgewebe gefertigt.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl.


Alle Gurte sind aus Nylonklett genäht.

7. Technische Daten


	Gr. 1	Gr. 2
für Körpergröße:	76 – 127 cm	122 – 163 cm
Sitzbreite:	30 cm	vorne: 41 cm hinten: 30 cm
Sitztiefe:	23 oder 28 cm	29 oder 34 cm
Rückenhöhe	61 cm	kurz: 46cm lang: 86cm
Höhe Armlehnen	14 cm	18 cm
Breite Untergestell:	52 cm	52 cm
Sitzhöhe Untergestell	25 – 51 cm	39 – 51 cm
max. Belastung:	82 kg	82 kg

 Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

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Wir beraten Sie gern...



Serien-Nr.

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

... wir bewegen mehr!

schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen · Fon 05405 909-0 · Fax 05405 909-109
mail@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de