

MADITA...

der mobile, mitwachsende Therapiestuhl

NEUHEIT



Abb. Grundmodell MADITA Größe 1
zusätzlich mit Kopfstütze (Standard), Thoraxpelotten und Oberschenkelführung

MADITA ist dank der vielfältigen Optionen, Größen und Verstellmöglichkeiten für alle Altersstufen vom Kleinkindalter bis zum Jugendlichen einsetzbar

- Individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition
- Sitzhöhe ist mittels Gasdruckfederunterstützung an unterschiedliche Tisch- oder Spielhöhen anpassbar
- Sitzkantelung ist per Gasdruckfeder verstellbar und kann so schnell und einfach an die aktuelle Verfassung des Kindes angepasst werden
- Madita lässt sich bei Bedarf mit leichter Vorneigung einstellen und erleichtert so Aktivitäten und fördert eine Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Für Entspannungsphasen kann der Therapiestuhl in eine Rücklage eingestellt werden
- Basierend auf dem Therapiestuhl MADITA sind Sonderbauten möglich, wie zum Beispiel das Einarbeiten individueller Körperabdrücke
- HMV Nr. 26.11.05.0021



Die Sitzbreite und die Abduktion sind durch die breiten-, tiefen- und winkelverstellbare Oberschenkelführung einstellbar



Sitz- und Rückenwinkelverstellung in die aktive oder passive Position



Die Höhenverstellung erfolgt mit Unterstützung einer Gasdruckfeder



Höhen- und winkelverstellbare Armlehnen



Höhen- und seiteneinstellbare Thoraxpelotten



Sitztiefeinstellung für eine lange Nutzungsdauer

Maße in cm	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Sitztiefe	15 - 25	21 - 30	30 - 42
Sitzbreite	16 - 26	20 - 30	28 - 38
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	32 - 37	32 - 37	42 - 52
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52	42 - 52	53 - 63
Sitzhöhe	46 - 58	46 - 58	46 - 58
max. Unterschenkellänge	18 - 24	22 - 32	30 - 48
Breite gesamt	45	45	53
Länge gesamt	66	66	77
Sitzwinkel	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°
Rückenwinkel	(-)5 - 25°	(-)5 - 25°	(-)5 - 25°
max. Belastung (kg)	30	30	50
Gewicht (kg)	16	17	19



MADITA OPTIONEN

mehr als nur ein Therapiestuhl

...wir bewegen mehr!





Zur Aktivierung der Rücken- und Nackenmuskulatur kann die Sitzneigung auch aktiv nach vorne eingestellt werden. Diese Funktion kann mit der neuen Option des abnehmbaren Rückens wesentlich besser genutzt und für das Kind spürbar gemacht werden. So gewährleistet bei abgenommenen Rücken die Beckenführung weiterhin eine sichere und stabile Basis für das Becken und somit der Sitzposition. Die Freiheit, die dem Kind im oberen Bereich des Rückens gegeben wird, motiviert zu mehr Aufrichtung und bietet mehr Platz für Aktivität. Diese Funktion kann in den Therapieplan eingebaut und auch für kurze Zeitabschnitte genutzt werden, da der obere Rücken samt Kopfstütze schnell wieder aufzustecken ist und dem Kind bei Ermüdung Anlage und Unterstützung bietet.



Mobilitätshilfen



Die einstellbare Beckenführung bietet dem Kind viel Sicherheit und positioniert das Becken. Fehlhaltungen durch das Ausweichen des Beckens zur Seite können weitestgehend mit dieser Option vermieden werden.



Eine medizinisch notwendige Abduktion der Oberschenkel kann mittels der Beinführungsoption und Einzelfußstützen mit der neuen MADITA-Serie sehr genau eingestellt werden. Ebenso ist eine Sitztiefendifferenz durch diese Option im Sitz einstellbar.